


使用前请仔细阅读本产品手册

智能交互门口屏

产品手册
M-WS01

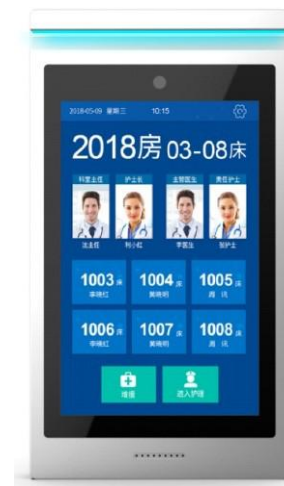

■ 注意事项

- 1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



- 2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



- 3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；



- 4、请勿自行拆卸本设备。

保修条例

尊敬的客户：

感谢您选购我们的产品，为保障您的合法权益，享受本公司完善的服务，请认真阅读本条款，并妥善保存您的保修卡。

一、本公司的产品享有自出售之日起一年返厂免费维修服务（含维修及元件更换），此日期自客户收到货之日起算。

二、以下情况将无法享受免费服务：

- 1、无保修凭证的；
- 2、未按使用手册采用错误方法、维护本产品，导致产品损坏的；
- 3、因不可抗力或非产品本身引起的意外事件导致产品损坏的；

目录

功能概述	1
产品简介	2
产品外观	2
产品尺寸图	2
接口说明	3
规格参数	3
基本功能	4
主界面	4
增援呼叫	5
扩理	6
设置	7
恢复出厂设置	8
安装	9

功能概述

本产品是M系列数字系统智能交互门口屏，基于 TCP/IP 传输协议,支持门灯提示，一键增援，医护信息在线显示和更新。

- 10.1寸电容触摸屏
- 时尚、简约外观设计
- 高档铝材质面盖
- 极简的挂墙式安装
- 友好图形化界面，操作界面
- 支持全双工可视对讲
- 一键增援及进入护理

保修卡

公司名称：_____

产品名称：_____

产品型号：_____

购买日期：_____


保修记录

保修日期	问题描述	处理方法	负责人


★此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保存。

安装说明


单位:mm



1. 将86盒对准墙上的预留槽(如图1所示), 再把连接主机的接线端从出线口穿过。然后在86盒四周灌水泥浆等填满缝隙。
注:(86盒离门边的距离建议在20cm以上, 高度建议1.6m)

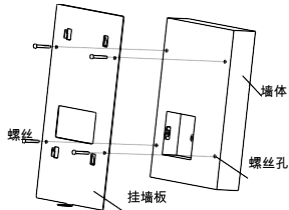

2. 用螺丝将挂墙板固定在墙上, 然后将连接主机的接线端从出线口穿过。

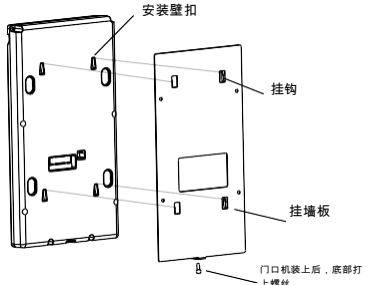

3. 将86盒里的接线端连接好主机后, 主机上的安装壁扣槽对准挂墙板的挂钩从上往下推到底, 再用螺丝从挂墙板底部拧紧即可完成安装(如图3所示)。

产品简介

◆ 产品外观



◆ 产品外观

单位:mm

