

## 智-10.1 寸智能交互门口屏



智系列数字系统\_V1.0

Z-WS06-W

# 目录

第一章 产品概述 .....	1
1.1. 功能特点 .....	1
1.2. 规格参数 .....	1
第二章 外观及接口说明 .....	2
2.1. 正视图 .....	2
2.2. 接口说明 .....	3
第三章 安装 .....	4
3.1. 安装说明 .....	4
第四章 故障排除 .....	5
第五章 保修卡 .....	6

# 第一章 产品概述

本产品是智系列的病房门口交互系统，安装于医院病房门口，采用标准六类线连接，基于TCP/IP传输协议，支持病房信息更新及显示，门灯提示，一键增援和一键护理，医护信息在线显示和更新。

## 1.1. 功能特点

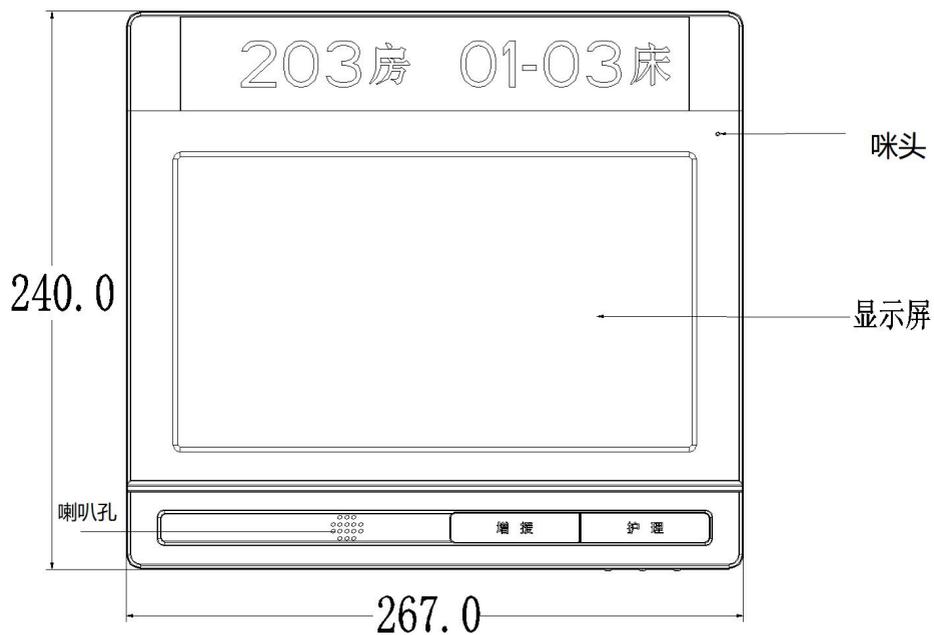
- 10.1 寸 电容触摸屏
- 高清显示屏，分辨率：1024\*600
- 集成病房多色门灯
- 全双工数字呼叫对讲

## 1.2. 规格参数

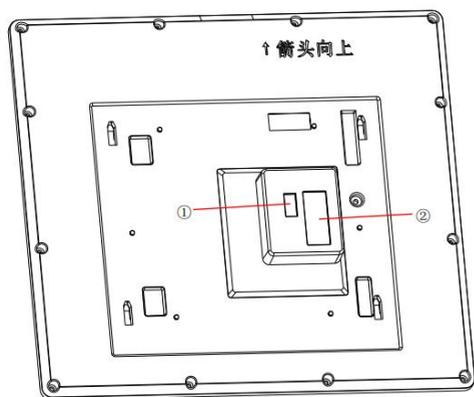
	LCD: 10.1 寸		支持 RJ45 网口
	分辨率: 1024*600		
	触摸屏: 电容触摸屏		独立供电口
<b>工作参数</b>	喇叭: 内置喇叭*1	<b>接口</b>	支持独立 485 拓展接口
	通话对讲: 全双工数字对讲		支持卫生间呼叫接口
	供电方式: 可支持独立功能及标准 PoE 供电 (48V)		
<b>产品尺寸 (W/H/D):</b>	267×240×22.5mm		

## 第二章 外观及接口说明

### 2.1. 正视图



## 2.2. 接口说明



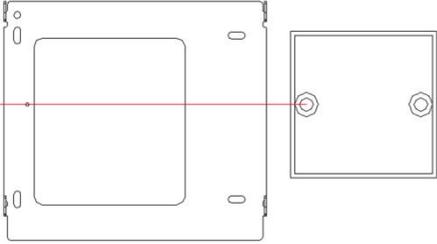
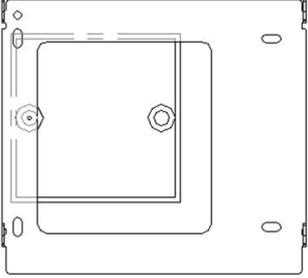
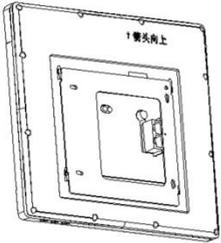
① 电源 24V (DC+)、GND (DC-)

K1 (Z1) (卫生间接钮接口), GND (卫生间接钮接口)

② RJ45 网络接口

# 第三章 安装

## 3.1. 安装说明

 <p>挂板与86盒的左边孔对齐(红色线), 定好孔位</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 用螺丝把挂墙板固定在墙上。</li></ol> <p>注: (86 盒离门边的距离建议在 20cm 以上, 高度建议 1.6m)</p>	 <ol style="list-style-type: none"><li>2. 挂墙板安装后的效果 (虚线是看不到的)。</li></ol>
 <ol style="list-style-type: none"><li>3. 机子 (接好对应的线) 安装进挂墙板, 对准挂钩向下推到底。</li></ol>	 <ol style="list-style-type: none"><li>4. 安装完成。</li></ol>

## 第四章 故障排除

在此将一些经常会出现的故障现象以及排除方法列出来，供用户参考。如遇故障无法排除，切勿自行拆卸维修，请与产品售后服务部门联系，我们将竭诚为您服务。

---

机子无法开机或自动关机

- 检查电源或者 POE 网线是否掉电，重新上电。
- 

分机显示屏较暗

- 检查屏幕亮度、对比度设置是否正确，或显示区保护膜是否撕除。
- 

通话过程中，分机无声音

- 检查分机音量是否调至最小。
- 

设备网络是否正常

- 首页网络图标没有显示 x 正常，显示这种图标 ，表示网络不通，需要排查网线设备是否已经连接服务器
  - 首页网络图标没有显示连接图标正常，显示这种图标 ，表示连接服务器异常，需要设置服务器地址和端口是否正确和网络环境
- 

设备温度较高

- 设备长时间使用导致机身温度较高，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
-

## 第五章 保修卡

为维护你的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

---

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	